

Erste Hilfe am Arbeitsplatz

Von Augenspülung bis Wundversorgung



04 **Erste-Hilfe-Koffer**

06 **Augenspülung**

09 **Reanimation**

12 **Wundversorgung**



Weitere Informationen auf
www.aluderm.de




Eine Marke der W.Söhngen GmbH

Seit mehr als 100 Jahren stehen wir für Qualität, Innovation und Vertrauen in der Wundversorgung. Wir sind seit Jahrzehnten bekannt für unsere orangefarbenen Erste-Hilfe-Koffer und ein breites Markensortiment für die Versorgung kleiner und großer Verletzungen. Damit man uns unser Alter aber nicht sofort ansieht, haben wir an unserer Optik gearbeitet.

Ab sofort bündeln wir unsere Erfahrung und Qualität in einem Namen und einem Look:

aluderm⁺
erlebe Vertrauen

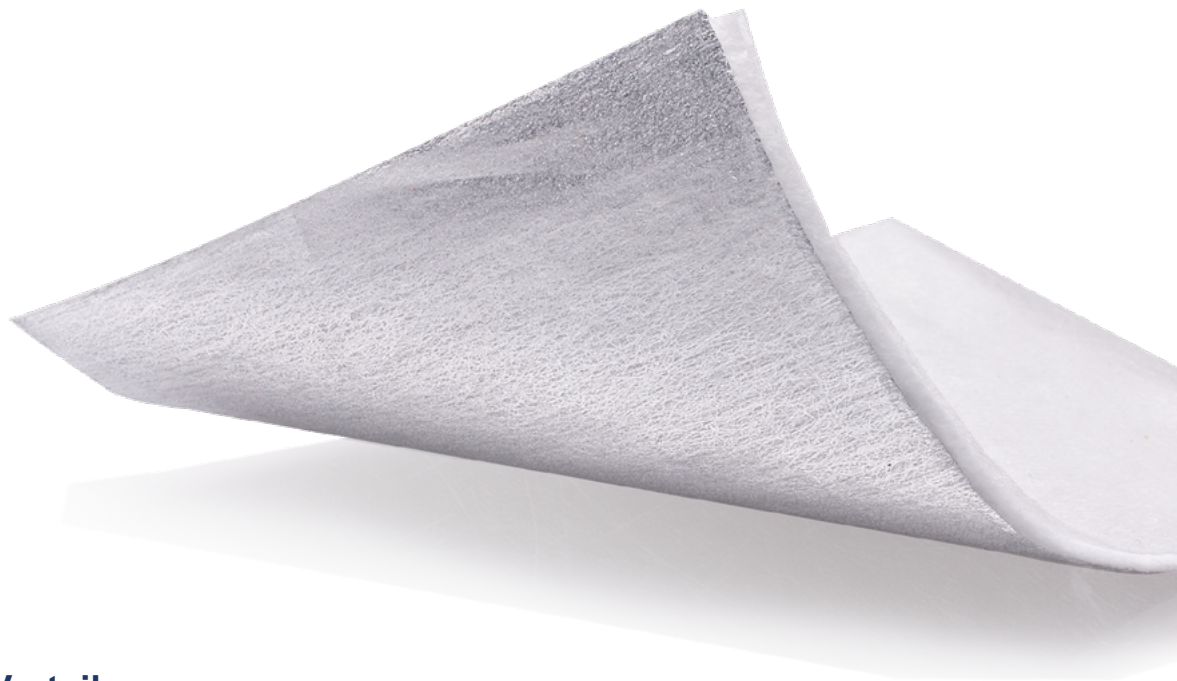

Ihre Vorteile

- hoher Wiedererkennungswert durch modernes, einheitliches Design
- alle wichtigen Informationen auf einen Blick
- innovative Produktlösungen, bewährte Qualität
- der neue **aluderm⁺** Shop enthält alle aktualisierten Produktinformationen

aluderm⁺ Verbandstoffe

- für Brandwunden 1. und 2. Grades geeignet
- fördern die Wundheilung
- verhindern die Bildung von Wundschorf
- reduzieren die Gefahr einer Narbenbildung

aluderm⁺ Erste-Hilfe-Koffer

Die aluderm⁺ Erste-Hilfe-Koffer verbinden modernes, funktionales Design mit klarer Struktur für den Notfall. Gefüllt mit einer hochwertigen DIN-Füllung, entsprechend der aktuellen ASR A4.3.

Dank der integrierten Wandhalterung lassen sie sich mühelos einhändig bedienen, bleiben stets übersichtlich organisiert, sind teilbar und verfügen über ein nachleuchtendes Material, das auch im Dunkeln für Orientierung sorgt. Dieses durchdachte Konzept gewährleistet optimale Sicherheit, klare Struktur und schnelle Hilfe im Ernstfall.



Erste-Hilfe-Koffer

aluderm Erste-Hilfe-Koffer DG S DIN 13157
 aluderm Erste-Hilfe-Koffer DG L DIN 13169
 aluderm Erste-Hilfe-Koffer DG S DIN 13157 + Augenspülung
 aluderm Erste-Hilfe-Koffer DG L DIN 13157 + Metallverarbeitung
 aluderm Erste-Hilfe-Koffer DG S DIN 13157 + Verbandstoffe

Art.-Nr.

3001407
 3001408
 3001420
 3001440
 3001421



aluderm⁺ Erste-Hilfe-Koffer + Zusatzfüllung

Bei den aluderm⁺ Erste-Hilfe-Koffern mit Zusatzfüllung (z.B. Verbandstoffe, Augenspülung oder Metallverarbeitung), ist die hochwertige DIN-Füllung im oberen Teil sicher durch eine praktische Sicherheitsplombe geschützt, sodass unbefugte Entnahmen verhindert werden. Gleichzeitig bleiben die zusätzlichen Materialien im unteren Teil jederzeit frei zugänglich und sofort einsatzbereit.

Beispiel: aluderm Erste-Hilfe-Koffer DG S DIN 13157 + Augenspülung



Die Sicherheitsplombe schützt den Inhalt nach DIN. Die Zusatzfüllung kann einfach entnommen werden.

Inhalt

aluderm Erste-Hilfe-Koffer DG S DIN 13157 + Augenspülung

- 1 × Füllung Standard 72 Teile DIN 13157
- 2 × aluderm Augenspülung 0.9% Sodium Chloride 200ml
- 1 × aluderm neutralisierende Augenspülung pH neutral 4.9% Phosphate 200ml
- 2 × WS-Fixierbinde 4 m × 8 cm
- 1 × aluderm Pore 5 m × 2,5 cm
- 2 × aluderm20 Augenkompressen
- 1 × Sicherheitsplombe

Art.-Nr.

- 3001420
- 3003018
- 2010062
- 2010064
- 1004102
- 1008111
- 1003340
- 0301222

aluderm⁺ Augenspülstation Basic

Mit der **aluderm⁺** Augenspülstation Basic haben Sie alle Augenspülungen zusammen. Diese moderne Systemlösung hält alle Augenspülungen übersichtlich und griffbereit in einer einzigen, hygienischen Einheit bereit. Sie ist individuell anpassbar an Ihre Anforderungen. Der transparente Klappdeckel sorgt für einen schnellen Überblick und sofortigen Zugriff im Notfall. Staubgeschützt, leicht nachfüllbar und stets einsatzbereit – für maximale Sicherheit und Effizienz am Arbeitsplatz.



Oberhalb der Augenspülung ist Platz für empfohlene Zusatzprodukte zur sicheren Nachversorgung.



Der Augenspülplan ist im Lieferumfang aller **aluderm⁺** Stationen enthalten.

Inhalt

aluderm Augenspülung Basic

2 × 500 ml aluderm Augenspülung 0,9% Sodium Chloride
1 × 200 ml aluderm neutralisierende Augenspülung pH neutral 4.9% Phosphate
2 × 5 × 20 ml aluderm Augenspülung 0.9% Sodium Chloride

Empfehlung

Augenklappe
aluderm Silk 5 m × 2,5 cm
aluderm20 Augenkompressen
aluderm Fixierbinde 4 m × 6 cm
aluderm Feuchttücherset zur Reinigung unverletzter Haut à 10 Stück

Art.-Nr.

2010065
2010063
2010064
2010061

1010020
1009140
1003340
1004101
1009309



aluderm⁺ Augenspülstation Solo

Die aluderm⁺ Augenspülstation Solo ist eine kompakte und benutzerfreundliche Erste-Hilfe-Station für schnelle und effektive Hilfe am Arbeitsplatz. Dank des schlanken, platzsparenden Designs lässt sich die Station nahezu überall montieren. Der Inhalt ist flexibel anpassbar, sodass individuelle Anforderungen problemlos erfüllt werden können. Einfach nachfüllbar und sofort einsatzbereit. Die aluderm⁺ Augenspülstation Solo ist die ideale Lösung für Arbeitsplätze, an denen schnelle Erste Hilfe entscheidend ist.



Der Augenspülplan ist im Lieferumfang aller aluderm⁺ Stationen enthalten.

Inhalt

aluderm Augenspülung Solo

1 × 500 ml aluderm Augenspülung 0,9% Sodium Chloride
1 × 5 × 20 ml aluderm Augenspülung 0.9% Sodium Chloride

Art.-Nr.

2010066
2010063
2010061

aluderm⁺ Augenspülflaschen

Die aluderm⁺ Augenspülflaschen bieten schnelle und sichere Hilfe bei Augenverletzungen und Verunreinigungen. Die Spüllösung mit 0,9% Natriumchlorid entspricht der natürlichen Tränenflüssigkeit und eignet sich ideal zum Ausspülen von Fremdkörpern oder zum sanften Reinigen des Auges. Ergänzend sorgt die neutralisierende Augenspüllösung mit 4,9% Phosphat dafür, dass Säuren und Laugen unmittelbar pH-neutralisiert werden und so das Risiko weiterer Gewebeschäden deutlich reduziert wird. Beide Lösungen sind gebrauchsfertig, leicht anzuwenden und ermöglichen eine sofortige Erstversorgung, für mehr Sicherheit an jedem Arbeitsplatz. Die Produkte dienen auch als Refill für unsere aluderm⁺ Augenspülstationen Basic und Solo.

aluderm Augenspülung 0,9%
Natrium Chloride



aluderm Neutralisierende Augen-
spülung pH neutral 4,9% Phosphate

Wichtig

Die aluderm Neutralisierende Augenspülung pH neutral 4,9% Phosphate ist nicht für Flusssäure geeignet, da diese giftig und stark ätzend für Augen, Haut und Knochen ist. aluderm pH neutral 4,9% Phosphate ist nicht als Erste-Hilfe-Mittel bei Augenunfällen mit Flusssäure vorgesehen, da es die ätzende Wirkung von HF nicht einschränken kann.



aluderm Augenspülung
0,9% Sodium Chloride refill



Inhalt

aluderm Augenspülung 0,9% Sodium Chloride

je 1 × 500 ml

je 1 × 200 ml

aluderm Neutralisierende Augenspülung pH neutral 4,9% Phosphate

je 1 × 200 ml

aluderm Augenspülung 0,9% Sodium Chloride refill

je 5 × 20 ml

Art.-Nr.

2010063

2010062

2010064

2010061



aluderm⁺ AED A1 & A2

Die AEDs von **aluderm⁺** wurden mit Blick auf Mobilität, Robustheit, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit entwickelt. Jedes Modell wurde unabhängig getestet, um sicherzustellen, dass es den höchsten Standards entspricht. Sie sind mit der neuesten Technologie und Funktionen ausgestattet, darunter Sprachanweisungen, leicht verständliche Grafiken, schnelle Analyse für die Schockabgabe und HLW-Unterstützung. Alle Modelle mit integrierter Kindertaste.



Inhalt

aluderm AED A1, DE (Abb. lks.)
 aluderm AED A2, DE, EN, FR (Abb. r.)
 aluderm PowerBeat A1, Variablen Sprachen
 aluderm PowerBeat A2, Variablen Sprachen

Art.-Nr.

0102208
 0102209
 0102210V
 0102211V



aluderm⁺ LifePad®

Das **aluderm⁺ LifePad®** ist ein Hilfsprodukt für den Ersthelfer beim Herzstillstand und soll mehr Menschen dazu motivieren, Erste Hilfe zu leisten. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung hilft Ihnen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Durch die farbigen LEDs erhalten Sie visuelles Feedback für den optimalen Kompressionsdruck. Ein akustisches Signal gibt Ihnen die optimale Kompressionsfrequenz von 100 Schlägen pro Minute vor. Durch das flexible Material passt sich das **aluderm⁺ LifePad®** jeder Körperform an und kann bei Personen ab 12 Jahren angewendet werden.

Die Auflagefläche zeigt die genaue Positionierung der Hände für die Reanimation. Kann auch in Kombination mit einem Defibrillator verwendet werden (Signalton dafür abschaltbar).



Inhalt

aluderm LifePad®

Art.-Nr.

0102087



aluderm⁺ AED Wandschrank

Schützen Sie Ihren aluderm⁺ Defibrillator zuverlässig und sorgen Sie gleichzeitig für schnellen Zugriff im Notfall. Der aluderm⁺ AED-Wandschrank ist die ideale Aufbewahrungslösung für alle gängigen automatisierten externen Defibrillatoren (AED). Gefertigt aus robustem Stahlblech mit pulverbeschichteter Oberfläche bietet der Schrank optimalen Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und mechanischen Einwirkungen. Dank seiner kompakten Bauweise lässt sich der AED-Schrank problemlos in Fluren, Eingangsbereichen oder Büros montieren. Er trägt zur besseren Sichtbarkeit und schnellen Verfügbarkeit des Defibrillators bei – ein entscheidender Faktor im Ernstfall.


Optional erhältlich mit dem



aluderm⁺ LifePad und dem



aluderm⁺ stop the bleed Set.

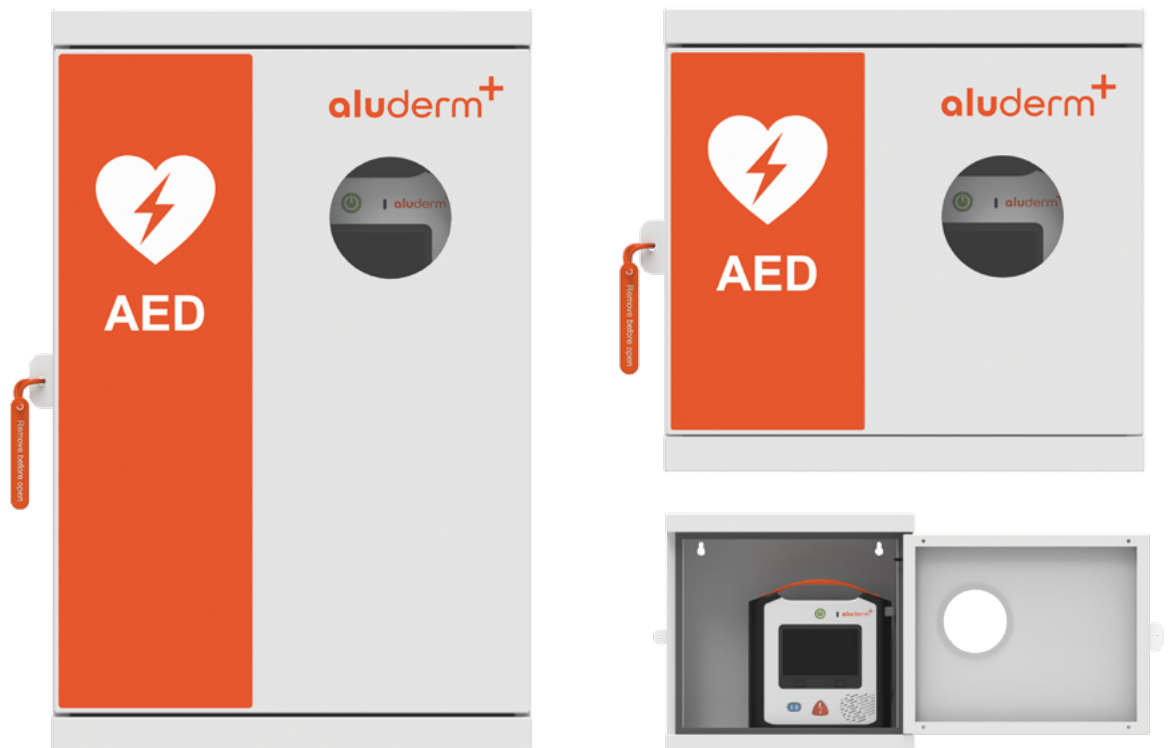

Inhalt

aluderm AED Wandschrank L
aluderm AED Wandschrank S

Art.-Nr.

0102212
0102213

aluderm⁺ Wundpflaster

Die aluderm⁺ Wundauflage besteht aus einem weichen Vliesstoff mit aluminiumbedampfter Oberfläche, die ein Verkleben mit der Wunde verhindert und somit einen nahezu schmerzfreien Pflasterwechsel ermöglicht. Zudem sind alle aluderm⁺ Wundpflaster für Verbrennungen 1. und 2. Grades geeignet. Durch ihre atmungsaktive Struktur bieten die Wundpflaster ein angenehmes Hautgefühl – bei optimalem Schutz vor äußeren Einflüssen wie Schmutz und Keimen. Erhältlich als Wundpflaster klassisch, sensitiv sowie wasserfest.



Inhalt

aluderm Wundpflaster sensitiv weiß 6 × 10 cm
 aluderm Wundpflaster sensitiv weiß 8 × 10 cm
 aluderm Wundpflaster Mix wasserfest
 aluderm Wundpflaster sensitiv weiß 4 × 10 cm
 aluderm Wundpflaster Mix weiß sensitiv
 aluderm Wundpflaster Mix transparent, wasserfest
 aluderm Kinder Wundpflaster Mix sensitiv
 aluderm Wundpflaster klassisch 8 × 10 cm
 aluderm Fingerstrips elastisch 2 × 12 cm
 aluderm Wundpflaster klassisch 6 × 10 cm
 aluderm Wundpflaster Mix klassisch

Art.-Nr.

1008314
 1008315
 1008317
 1008313
 1008316
 1008300
 1008312
 1008303
 1008306
 1008302
 1008304



aluderm⁺ Wundspray

Das aluderm⁺ Wundspray ist eine lokale Wundspüllösung zum Reinigen, Spülen sowie Befeuchten von Wunden und ist zur Behandlung von Hautabschürfungen, Verletzungen, Schnittwunden sowie Verbrennungen geeignet. aluderm⁺ Wundspray ist nicht reizend, verhindert Biofilm und ist ab 0 Jahren anwendbar.

Die alkoholfreie Zusammensetzung ist besonders sanft zur Haut und eignet sich daher auch hervorragend für empfindliche Hauttypen, Kinder oder sensible Körperstellen. Dank des praktischen Sprühmechanismus lässt sich das Spray kontaktlos und hygienisch auftragen, was das Risiko einer weiteren Keimverschleppung reduziert. Durch die mechanische Reinigung der Wunde werden Fremdkörper entfernt, um Hautreizungen und Infektionen vorzubeugen. aluderm⁺ Wundspray schafft so ein optimales Wundmilieu hinsichtlich Feuchtigkeit, Sauerstoff und pH-Wert, um die Heilung effektiv zu unterstützen.



aluderm⁺ Erste-Hilfe-Materialien

Die Erste-Hilfe-Materialien von **aluderm⁺** zeichnen sich durch ihre hochwertige Verarbeitung und eine innovative Zusammenstellung aus. Entwickelt für den professionellen Einsatz, aber ebenso geeignet für den Alltag, bieten sie zuverlässige Hilfe bei kleineren Verletzungen, Unfällen oder akuten Notfällen.

Ob zu Hause, bei der Arbeit, beim Sport oder auf Reisen: **aluderm⁺** begleitet Sie überall dort, wo schnelle Hilfe gefragt ist. Die Produkte sind durchdacht, kompakt und sofort einsatzbereit – ideal für unterwegs, im Auto, in der Handtasche oder im Rucksack. Dank ihrer sehr guten Qualität und der praxisnahen Anwendungsfreundlichkeit lassen sie sich mühelos in jede Notfallsituation integrieren. Gerade unterwegs, ob auf Ausflügen, im Urlaub oder im Straßenverkehr – kommt es auf schnellen Zugriff, Zuverlässigkeit und Hygiene an. **aluderm⁺** bietet genau das: leicht handhabbare Materialien, hygienisch verpackt und optimal aufeinander abgestimmt. So können kleine Verletzungen sicher versorgt werden – ohne Zeitverlust und mit dem guten Gefühl, bestens ausgerüstet zu sein.



Inhalt

aluderm Rettungsdecke Kinder 120 × 160 cm gold/silber mit Box
 aluderm Rettungsdecke 160 × 210 cm gold/silber mit Box
 aluderm Feuchttücherset zur Reinigung unverletzter Haut à 10 Stück
 aluderm Fixierbinde elastisch 4 m × 6 cm mit Box à 3 Stück
 aluderm Fixierbinde elastisch 4 m × 8 cm mit Box à 3 Stück
 aluderm Kälte-Sofort Komresse 15 × 21 cm mit Box
 aluderm Kinder Kälte-Sofort Komresse 15 × 21 cm mit Box
 aluderm Dreiecktuch 96 × 96 × 136 cm weiß mit Box
 aluderm Handschuh-Set Vinyl groß mit Box
 aluderm Schere mit Box
 aluderm20 Verbandpäckchen mittel mit Box

Art.-Nr.

1008325
 1008324
 1009309
 1008327
 1008328
 1008329
 1008330
 1008326
 1008331
 1008332
 1008322



Verbände und Kompressen

Die **aluderm⁺** Kompressen und Verbände überzeugen durch ihre erstklassige Qualität und eine besondere Materialkombination aus aluminiumbedampfter Oberfläche, einem starken Saugkern und einem hydrophoben PP-Vlies. Die aluminiumbedampfte Oberfläche sorgt dafür, dass die Wunde nicht mit der Wundauflage verklebt. Das Wundsekret wird schnell in den Saugkern transportiert und bleibt dort. Dies sorgt für eine sanfte, schmerzarme Versorgung und eine bestmögliche Wundheilung.

Ob bei Schürfwunden, Schnittverletzungen, Brandwunden oder anderen Hautverletzungen: **aluderm⁺** Kompressen und Verbände sind so entwickelt, dass sie sowohl im professionellen Bereich als auch im Alltag eine sichere und komfortable Lösung bieten.



Inhalt

aluderm20 Verbandtuch 80 × 120 cm
 aluderm20 Verbandtuch 60 × 80 cm
 aluderm20 Spezial-Druckverbandpäckchen
 aluderm20 Komresse einzeln 10 × 10 cm
 aluderm20 Augenkomresse
 aluderm Verbandspäckchen DIN mittel
 aluderm20 Verbandspäckchen DIN mittel

Art.-Nr.

1003206
 1003205
 1002001
 1003208
 1003340
 1003372
 1003373



© W.Söhngen GmbH . Produktdarstellung und Gestaltung alle Rechte bei W.Söhngen GmbH . Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der W.Söhngen GmbH. Abbildungen können abweichen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der W.Söhngen GmbH.
[aluderm/AGB](#)

W.Söhngen GmbH . Platter Str. 84 . 65232 Taunusstein . Deutschland
info@aluderm.de . +49 (0)6128 873 0 . @ aluderm_de . www.aluderm.de

aluderm+ ist eine
Marke der W.Söhngen GmbH

Stand: 01-2026